

GELA 225 VISIR

Beskrivning

GELA 225 VISIR ger ett komplett ögon- och ansiktsskydd. GELA 225 VISIR är designad för att användas endast för personal inom sjukvård och omvårdnad. Visiret skall användas i miljöer där användaren utsätts för vätskestänk och/eller droppsmitta.

- Visiret ger ett utmärkt skydd mot partiklar med låg anslagsenergi t.ex. vätskestänk och droppar.
- Enkel att ta på sig med huvudfästet som fungerar som vanliga glasögonbågar
- Låg vikt
- Kräver inget underhåll
- Avtagbart/utbytbart visirskydd (finns som tillbehör art. GELA225V)
- Arbetstemp: -5° C till +40°C
- Vikt: 41gram

Material

Visir: polyetylen tereftalat amorf (PET-A), tjocklek 0,3mm

Hållare: polycarbonat/acrylbutadienstyren (PC/ABS)

Standard

GELA 225 VISIR har testats och möter kraven i MET5659 utg.1, som är baserad på EN166 men med vissa undantag för moment som inte bedömts kritiska i ett kortare perspektiv för aktuell skyddstyp. Genom detta uppfylls de väsentliga kraven i PPER (EU) 2016/425 för den aktuella användningen.

Optiska krav: GELA 225 VISIR möter kraven i optisk klass 1, vilket är den högsta klassen.

Slagtålighet: GELA 225 VISIR skyddar mot vätskepartiklar med hög hastighet, men med låg anslagsenergi i 45m/s

Skyddar mot vätskestänk: GELA 225 VISIR skyddar mot vätskestänk

Godkännande

GELA 225 VISIR har testats och möter kraven i MET5659 utg.1, som är baserad på EN166 men med vissa undantag för moment som inte bedömts kritiska i ett kortare perspektiv för aktuell skyddstyp. Genom detta uppfylls de väsentliga kraven i PPER (EU) 2016/425 för den aktuella användningen.

Referens nr: 105105-2P04584-01

EU-försäkran om överensstämmelse finns att ladda ner på denna adress: www.gela.se

EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857, SE-50115 BORÅS
Anmält organ nr 0402”

Användningsområden

GELA 225 VISIR är designad för att användas endast för personal inom sjukvård och omvårdnad. Visiret är inte avsett för industriellt bruk eller maskinskydd. Denna bruksanvisningen måste finnas tillgänglig för alla brukare. Finns att ladda ner på www.gela.se

Tillpassning av visiret

GELA 225 VISIR är designad för att användas endast för personal inom sjukvård och omvårdnad. Visiret är inte avsett för industriellt bruk eller maskinskydd.

GELA 225 VISIR levereras monterat och färdigt att användas. Visiren ligger packade i kartong med plastpåse.



Rengöring

GELA 225 VISIR rekommenderas att rengöras varje gång visiret har använts. Produkten ska/kan rengöras med en fuktig trasa och varmt såpvatten eller med desinficerande medel t.ex. etanol/isopropanol. Därefter skall det torka i rumstemperatur. Det går även att använda desinficerande våtservetter.

Använd inte bensin, klorerade avfettningsvätskor (t.ex. trikloretylen), organiska lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel för att rengöra utrustningen.


Monteringsanvisning

Vid behov kan visirglaset bytas ut och då gäller följande monteringsanvisning:


1.



2. Montera visiret i första hållaren.

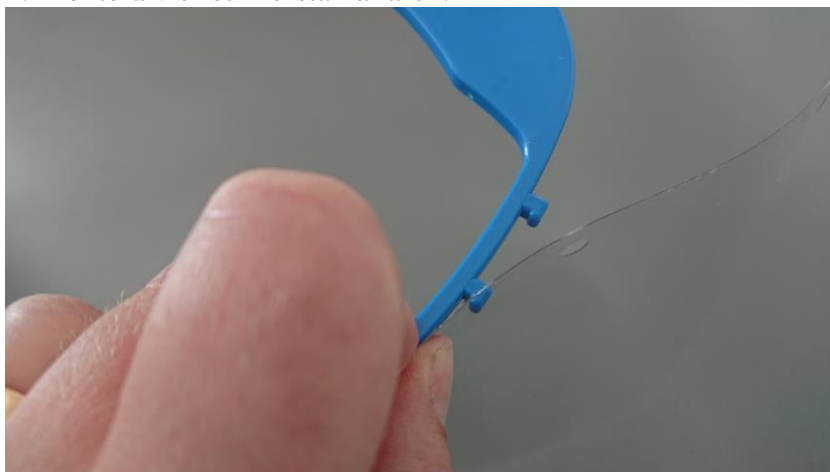

3. Snäpp sedan på resterande i löpande ordning.

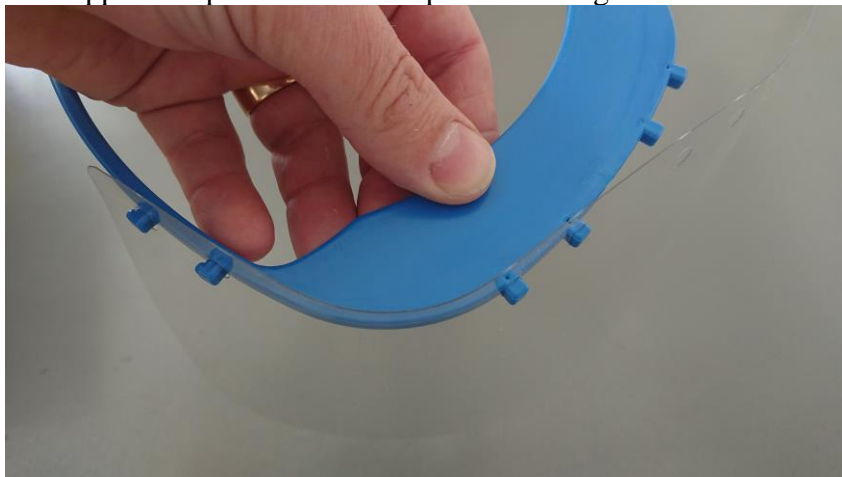

4. Avsluta med att snäppa på sista snäppet och kontrollera att visiret har snäppt i ordentligt.



5. Visiret är nu redo att användas

